

Indywidualne wkładki ortopedyczne

Instrukcja używania i konserwacji

Adaptacja

Przez pierwsze 3-4 dni noszenia wkładek **możesz odczuwać dyskomfort**. Zalecamy przerwy w ich noszeniu od 30 minut do 2 godzin do czasu, aż dyskomfort minie. Zbagatelizowanie go może doprowadzić do pojawienia się bolesnych odcisków lub pęcherzy na stopach. W przypadku nieustępujących dolegliwości podczas używania wkładek utrzymujących się dłużej niż tydzień, niezwłocznie umów się na wizytę kontrolną.

Pełna adaptacja do wkładek następuje po minimum 3 tygodniach ich ciągłego używania.

Po 4-6 tygodniach noszenia wkładek konieczna jest wizyta kontrolna. Wizytę taką możesz umówić za pośrednictwem infolinii lub przez stronę internetową. Na wizytę kontrolną zabierz wszystkie posiadane wkładki.

W okresie 6 miesięcy od pierwszej konsultacji wszystkie wizyty kontrolne i korekty wkładek są bezpłatne. Po tym czasie jedna wizyta jest płatna i przedłuża bezpłatne kontrole na kolejne 6 miesięcy.

Konserwacja

- czyść wkładki ręcznie (letnia woda, szczotka i płyn do mycia naczyń)
- susz je naturalnie (nie susz na słońcu, grzejniku lub suszarką)
- nie czyść chemicznie
- nie pierz w pralce
- nie nagzewaj
- nie naprawiaj uszkodzeń samodzielnie
- ostrożnie używaj łyżki do butów

Informacje dodatkowe

Wkładki wykonane są do konkretnego typu obuwia, możesz je więc przekładać do innych butów tego samego rodzaju. **Nie przekładaj wkładek do butów innego typu, w szczególności z obuwia płaskiego do butów na obcasie lub odwrotnie.** Wkładki zrobione do konkretnej pary butów niekoniecznie będą pasować do innej pary. W takiej sytuacji nie docinaj ich samodzielnie. Umów się na bezpłatną wizytę kontrolną i przynieś buty, do których chcesz mieć dopasowane wkładki.

- Gwarancja na wkładki wynosi 12 miesięcy.**
- Trwałość wkładek zależy od poziomu aktywności ruchowej oraz liczby używanych wkładek, a tym samym częstotliwości ich użytkowania.**
- W przypadku dzieci konieczna jest wymiana wkładek, gdy dziecko z nich wyrośnie.**
- W przypadku dorosłych trwałość wkładek może wynieść nawet 2-3 lata.**
- Uszkodzenia mechaniczne powstałe w wyniku użytkowania niezgodnego z niniejszą instrukcją nie mogą być podstawą do reklamacji.**

Notatki
